

**일 시** : 2022년 07월 18일  
**수 신** : 병(의)원의 진단검사의학과 실장님  
**발 신** : (주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부  
**제 목** : Total Bilirubin(Code 21506) 검사 시약 Test Parameter 변경 안내의 건

1. 저희 바이오시스템즈 제품을 사용해주시는 각 병(의)원 실장님들께 감사의 말씀을 드립니다.
2. Total Bilirubin 검사에 사용되는 검체 종류에 Plasma (Heparin 항응고제 사용 튜브)가 추가되어 BA200 및 BA400 Software 에서 Test Parameter 의 변경이 필요합니다. 변경이 필요한 제품은 **Total Bilirubin (Code : 21506)의 Lot # 47160 부터 적용**되며, 해당 장비 모델별 변경 사항을 아래와 같이 전달하여 드리오니, 검사에 참고 부탁드립니다.
3. 검사 장비 모델별 변경 사항 요약


### 1) BA200 Test Parameter

절차 (Procedure)	변경 전	변경 후
리딩 모드 (Reading mode)	단색 (Monochromatic)	2 색 (Bichromatic)
참조 필터 (Reference filter)	-	670
리딩 2 (Reading 2)	34cycle	33cycle

### 2) BA400 Test Parameter

절차 (Procedure)	변경 전	변경 후
리딩 모드 (Reading mode)	단색 (Monochromatic)	2 색 (Bichromatic)
참조 필터 (Reference filter)	-	670

4. 변경사항이 적용되는 Total Bilirubin 시약 Box 외관에 '주의' 안내 스티커가 부착되어 출고되니, 스티커 확인 시 고객센터 (031-790-1956, 1942)로 연락 하시어 원격지원을 통한 Test Parameter 변경 적용을 지원 받으시길 부탁드립니다. 아울러, 아래의 "주의" 안내 스티커는 일정 기간 해당 Kit 에 부착되어 출고되오니 Test Parameter 변경을 완료 하신 고객분께서는 무시 하셔도 좋습니다.

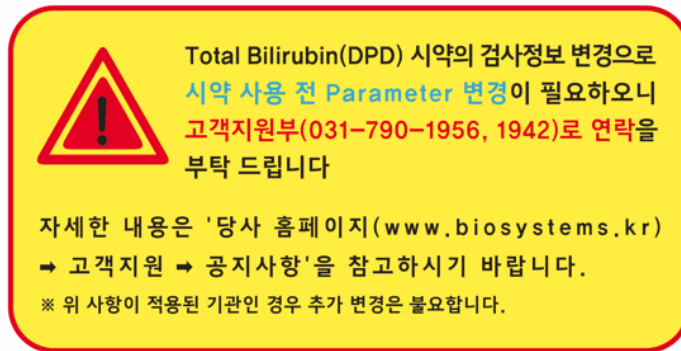

(주)바이오시스템즈 한국지사  
고객지원부